

# CM ProSlide™

CM ProLine

Glidskiva



- ✓ LÄTTAPPLICERAD
- ✓ HYGIENISK
- ✓ ERGONOMISK
- ✓ SLITSTARK

#### PRODUKTINFORMATION:


ProSlide är tillverkad i 3 mm flexibel HD-polyeten med lågfriktionsegenskaper. Används vid alla typer av överflyttningar, vändning av patient m.m. Kan även användas som lyfthjälpmiddel vid bedsideröntgen.

Ger inga artefakter på röntgenbilder.

Tvättråd:  
Desinficeras med spritvållösning.

Kan tillverkas i specialmått.  
Mått. 86x39 cm  
Artikelnr: CMPRO

Article nr: CMPRO

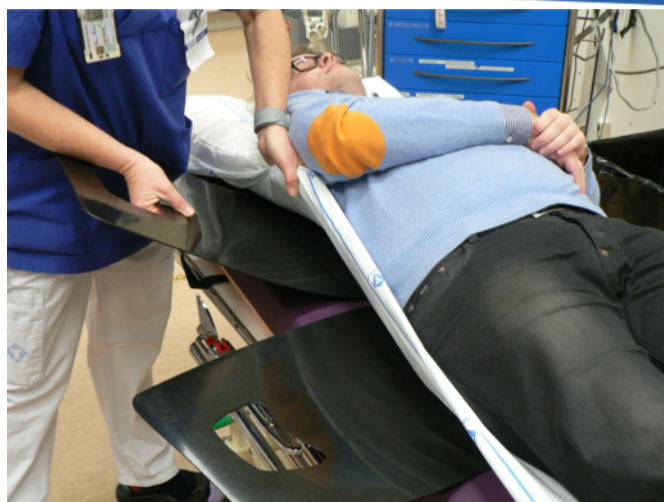

Sträck under-och draglakan och greppa ProSlide som bilden visar. Den matta sidan bör vändas nedåt. För optimal funktion bör två st ProSlide användas, en under stussen och en under thorax. Skjut in ProSlide drygt halvvägs under patienten. Låt sedan patienten glida över med hjälp av draglakan eller liknande.

OBS: - Använd aldrig Proslide direkt mot patientens hud.

#### Återförsäljare:

Comfort Medical AB  
Hjalmar Brantings väg 11G  
SE - 261 43 Landskrona  
SWEDEN  
Tel: 0733 109020  
0706 815141  
Mail: info@comfortmedical.se  
www.comfortmedical.se

COMFORT medical