

CM T-Fix

CM ProLine



Enkel och snabb fixation av huvudet.



Varje set levereras komplett med hätta, kudde och hak-pannband.

PRODUKTBeskrivning

CM T-Fix är en engångs huvudfixation för traumamadrasser. I förpackningen ingår hätta, två hak-pannband samt fixationskudde för huvudet. Materialet är miljövänligt och består av polyuretan och polyester. Hättan är helt vätsketät.

CM T-Fix erbjuder enkel och snabb immobilisering av huvudet med fixationskudden och två hak-pannband. Kudden fästes med kardborre direkt mot överdraget.

- SÄKER IMMOBILISERING
- HYGIENISK
- TIDSBESPARANDE

Namn: CM T-FIX Huvudfixation

Artikel nr: CMTFIX

Förpackningsstorlek: 25st/box

Mått kudde: 27x27x7 cm

Material: Polyeterskum, Polyuretan och polyester

Återvinning: Ingen demontering behövs. Sortera som brännbart avfall. Kontaminerat avfall sorteras i enlighet med sjukhusets riktlinjer.

CE  single use only

Senast uppdaterad 2020-09-24

Bruksmanual CM T-Fix



1. Trä hättan över huvuddelen på traumamadrassen.



2. Spänn kardborrebanden hårt runt madrassen.



3. För in kudden tätt mot patientens huvud och fixera den med kardborrefästena direkt mot hättan. Långt hår som hamnar i området där kudden ska fästas bör föras framåt och in under nackkragen.



4. Fixera patientens huvud med de medföljande hak-pannbanden. Banden fixeras mot de röda kardborrefästena på kudden och hätta.