

CM TraumaCover

CM ProLine



PRODUKTBeskrivning

CM TraumaCover är ett engångsöverdrag för traumamadrasser. I förpackningen ingår överdrag, två hak-pannband samt fixationskudde för huvudet. Materialegenskaperna minimerar patientens värmeförlust samt bidrar till bättre hygien. Överdraget har en absorberande insida och vätsketät utsida, därmed kan användandet av CM TraumaCover kraftigt reducera behovet av städning/rengöring.

Huvudfixationen ger enkel och snabb rörelsebegränsning av huvud och nacke. Huvudfixationen är integrerad med överdraget. Huvudkudden fästes enkelt med kardborre direkt mot överdragets insida.

CM TraumaCover finns även i barnstorlek anpassad för CM TraumaMattress Mini.

- HUVUDFIXATION
- HYGIENISKT
- TIDSBESPARANDE
- VÄRMANDE

Vuxencover till CM Trauma Mattress:

- **Mått:** 205x170 cm
- **Artikel nr:** CMCOVER
- **Förpackningsstorlek:** 15 st/box

Barncover till CM TraumaMattress Mini:

- **Mått:** 140x120 cm
- **Artikel nr:** CMCOVERM
- **Förpackningsstorlek:** 15 st/box

Återvinning: Ingen demontering behövs. Sortera som brännbart avfall. Kontaminerat avfall sorteras i enlighet med sjukhusets riktlinjer.

CE  single use only

2025-07-11 (Utg:3)

Användarguide CM TraumaCover



1. För överdraget över huvuddelen på traumamadrassen. Sträck från fotändan.



2. Spänn kardborrebanden hårt runt madrassen.



3. För in kudden tätt mot patientens huvud och fixera den med kardborrefästena direkt mot överdraget. Långt hår som hamnar i området där kudden ska fästas bör föras framåt och in under nackkragen.



4. Fixera patientens huvud med de medföljande hak-pannbanden. Banden fixeras mot de röda kardborrefästena på kudde och överdrag.

