





### Bruksanvisning

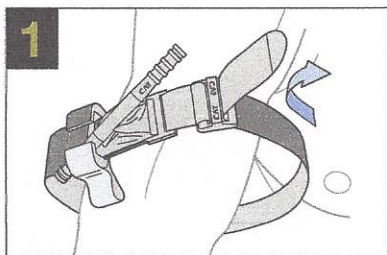

#### Tvåhandsapplicering





Dra bandet runt extremiteten, tryck änden på bandet genom spännet och placera **CAT** 5-7,5cm ovanför blödningen direkt mot huden.\*

OR

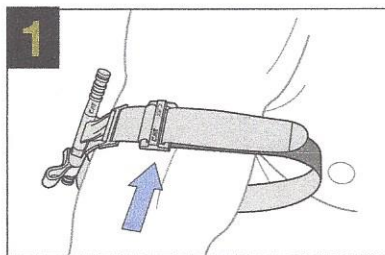

#### Enhandsapplicering

Placera den skadade extremiteten genom öglan och placera **CAT** 5-7,5cm ovanför blödningen direkt mot huden.\*

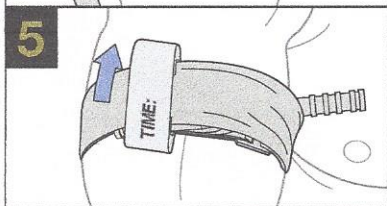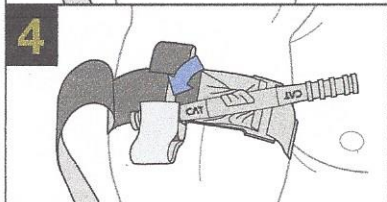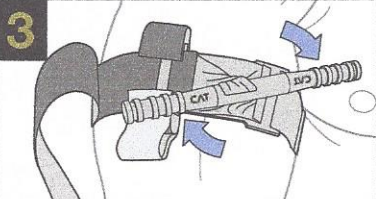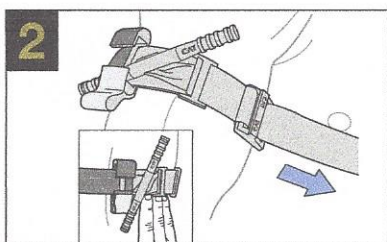

Dra åt bandet hårt och sätt fast den på bandet genom att dra bandet tillbaka över kardborren men inte över låsbygeln. Bandet skall sitta så hårt att man inte kan få in tre(3) fingrar mellan bandet och extremiteten. Om man kan få in tre(3) fingrar mellan bandet och extremiteten så spänn igen och fäst.

Vrid vridstaven till dess blödningen är stoppad.

Säkra vridstaven inne i låsbygeln. Kontrollera blödningen och distal puls. Om blödningen fortsätter eller det finns distal puls, överväg om bandet behöver spännas mer eller om man skall applicera en andra **CAT** ovanpå eller vid sidan om den första. Revaluera.

Trä bandet mellan spännet och över vridstaven. Säkra vridstaven och bandet med fliken märkt med TIME. Dokumentera tid för applicering.

\*Om du inte kan vara säker eller har tillräckligt med tid för att undersöka var blödningen kommer ifrån på grund av situationen, kan **CAT** appliceras över kläder så högt upp på armen eller benet som möjligt. **CAT** skall inte appliceras över hårda objekt i fickor. Så fort situationen tillåter skall den skadade extremiteten revalueras och **CAT** skall placeras 5-7,5cm ovan skadan direkt mot huden.

# COMFORT medical

Hjalmar Brantings väg 11G, 261 43 Landskrona Sweden  
tel. +46 (0)73 310 90 20 • [info@comfortmedical.se](mailto:info@comfortmedical.se)  
[www.comfortmedical.se](http://www.comfortmedical.se)